



¿CÓMO FUNCIONA EL BLANQUEAMIENTO?

Para blanquear los dientes, es necesario abordar las moléculas de color que hay detrás del esmalte. Esto puede hacerse con peróxido de hidrógeno. Está en el gel blanqueador. Cuando lleva una cubeta de blanqueamiento con el gel blanqueador en su boca, comienza una reacción. Durante esta reacción se libera energía. Esta energía rompe las moléculas de color detrás del esmalte, haciendo los dientes más blancos.



antes

después

EL BLANQUEO EFICAZ COMIENZA CON SU DENTISTA

Hay muchos materiales de blanqueamiento disponibles en diferentes lugares. Solo en la consulta dental se obtienen productos seguros y legalmente aprobados para un blanqueamiento eficaz. De este modo, conseguirá uno resultado duradero, y unos preciosos y radiantes dientes blancos naturales. Además, su dentista puede informarle y orientarle bien durante el tratamiento de blanqueamiento.

Antes del blanqueamiento, su dentista le dará el Cavex Bite&White ABC Masterkit para que se lo lleve a casa. El kit contiene una cubeta de blanqueamiento hecha a medida y gel blanqueador con peróxido de hidrógeno. El dentista le explicará las instrucciones y le dará consejos prácticos para utilizarlo en casa. Usted decide entonces cuándo, dónde y cuánto tiempo desea que dure el blanqueamiento.

POR ESO CAVEX BITE&WHITE

- Blanqueamiento rápido, seguro y eficaz
- Blanqueamiento bajo la supervisión de su dentista
- Dónde y cuándo quiera blanquear con un resultado duradero
- Sistema completo de blanqueamiento de 3 pasos con productos para antes y después del tratamiento
- Recomendado desde hace años por dentistas en todo el mundo

PREMIUM WHITENING

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

PREMIUM WHITENING

¿QUIERE UNOS PRECIOSOS DIENTES BLANCOS NATURALES?

BLANQUEAMIENTO DENTAL SEGURO

Donde y cuando quiera, bajo la supervisión de su dentista

CAVEX

ZB951ES.04

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

CONSIGA DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA UNOS DIENTES BLANCOS NATURALES CON EL CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

CONSIGA TAMBIÉN ESA SONRISA RADIANTE CON DIENTES BLANCOS NATURALES

Reír es saludable; hace que uno se sienta feliz y le da confianza. Por eso, a todos nos gustaría tener una sonrisa bonita. La base para esto son unos preciosos dientes blancos naturales. Esto es ahora muy fácil de conseguir gracias al Cavex Bite&White ABC Masterkit. Con este sistema único de 3 pasos, puede realizar el blanqueamiento donde y cuando quiera, bajo la supervisión de su dentista. En muy poco tiempo, tendrá una sonrisa radiante con unos preciosos dientes blancos naturales.

¿POR QUÉ SE DECOLORAN LOS DIENTES?

La mayoría de la gente empieza con unos bonitos dientes blancos. Con el tiempo, el tabaco, el café y otros alimentos decoloran los dientes. Con los años, se acumulan moléculas de color detrás del esmalte. Con la edad el esmalte se vuelve cada vez más fino, y los dientes se vuelven más oscuros. ¡Pero hay algo para evitarlo! Puede blanquear sus dientes de forma rápida, segura y eficaz con el Cavex Bite&White ABC Masterkit.

BLANQUEAMIENTO EN CASA: ¡TAN FÁCIL COMO EL ABC!

El Cavex Bite&White ABC Masterkit es un sistema eficaz, seguro y completo de 3 pasos, que le permite blanquear durante solo 30 a 60 minutos al día.

A

ACTIVAR

Cavex Bite&White StainLess

Este dentífrico de limpieza profunda hace que sus dientes estén extra limpios. Elimina las manchas superficiales y aumenta temporalmente el pH de la boca. Esto hace que el gel blanqueador actúe más rápidamente. Comience su tratamiento de blanqueamiento cepillándose durante 2 minutos con StainLess.

B

BLANQUEAR

Cavex Bite&White gel

El gel ha sido desarrollado para que se extienda perfectamente sobre los dientes y el peróxido de hidrógeno y comience a blanquear inmediatamente. Como ya se ha cepillado primero con el activador StainLess, solo necesitará llevar la cubeta de blanqueamiento de 30 a 60 minutos.

Cavex Bite&White ABC Masterkit |

Un completo sistema de blanqueamiento de 3 pasos en 1 kit.



C

ACONDICIONAR

Cavex Bite&White ExSense

Este gel acondicionador remineraliza los dientes, endureciéndolos y minimizando el riesgo de sensibilidad. Usted aplica el acondicionador en su cubeta de blanqueamiento y la lleva durante 10 minutos.

MÁS INFORMACIÓN

¿Desea saber más sobre el blanqueamiento de sus dientes? Pida información a su dentista. Su dentista puede informarle de todo lo relacionado con Cavex Bite&White y ayudarle durante el tratamiento del blanqueamiento. Escanee el código QR para ver los vídeos sobre ABC Masterkit.



Cavex Bite&White ABC Masterkit |

La solución completa de blanqueamiento en casa de 3 pasos.

CAVEX BITE&WHITE: RECOMENDADO POR DENTISTAS DE TODO EL MUNDO

Cavex Bite&White es un producto de Cavex Holland. Cavex Holland lleva más de 100 años suministrando productos de primera calidad a dentistas en todo el mundo. Todos los productos Cavex han sido ampliamente probados y cumplen con todas las directrices y la legislación mundial. Los dentistas recomiendan con entusiasmo nuestros productos.