



COMMENT FONCTIONNE LE BLANCHIMENT ?

Pour blanchir les dents, il faut s'attaquer aux molécules colorées qui se trouvent derrière l'émail. Cela peut se faire avec le peroxyde d'hydrogène contenu dans le gel de blanchiment. Lorsque vous placez la gouttière contenant le gel de blanchiment dans votre bouche, une réaction se déclenche. Cette réaction libère de l'énergie. Cette énergie décompose les molécules colorées qui se trouvent derrière l'émail, les dents deviennent ainsi plus blanches.



avant

après

LE BLANCHIMENT RESPONSABLE COMMENCE CHEZ VOTRE DENTISTE

De nombreux produits de blanchiment sont proposés dans différents endroits. Mais ce n'est que chez le dentiste que vous pourrez obtenir des produits sûrs et homologués pour blanchir vos dents de manière responsable. Vous obtiendrez ainsi un résultat durable et une belle dentition qui rayonne d'une blancheur naturelle. Votre dentiste est en outre en mesure de bien vous informer et vous accompagner pendant le traitement.

Le dentiste vous fournira le Cavex Bite&White ABC Masterkit pour blanchir vos dents à la maison. Ce kit contient une gouttière fabriquée sur mesure et un gel de blanchiment au peroxyde d'hydrogène. Le dentiste vous donnera instructions et conseils pratiques pour commencer le traitement à la maison. Ensuite, vous décidez vous-même quand, où et pendant combien de temps vous appliquez le traitement de blanchiment.

LES AVANTAGES DE CAVEX BITE&WHITE

- Blanchiment rapide, sûr et efficace
- Blanchiment sous la supervision de votre dentiste
- Où et quand vous le souhaitez, pour un résultat durable
- Système complet de blanchiment en 3 étapes, avec produits pré et post-traitement
- Recommandé depuis de nombreuses années par les dentistes du monde entier

PREMIUM WHITENING

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

PREMIUM WHITENING

VOUS AIMERIEZ VOUS AUSSI DE BELLES DENTS D'UNE BLANCHEUR NATURELLE ?

BLANCHIR VOS DENTS EN TOUTE SÉCURITÉ

Où et quand vous le souhaitez, sous la supervision de votre dentiste



CAVEX

ZB954FR.04

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

DES DENTS D'UNE BLANCHEUR NATURELLE, RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LE CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

OFFREZ-VOUS CE SOURIRE RADIEUX AUX DENTS
D'UNE BLANCHEUR NATURELLE

Rire est bon pour la santé, cela rend heureux et donne confiance en soi. C'est pourquoi nous voulons tous un sourire radieux. Le secret d'un tel sourire est une belle dentition d'une blancheur naturelle. C'est désormais très simple à obtenir grâce au Cavex Bite&White ABC Masterkit. Avec ce système unique en 3 étapes, vous pouvez blanchir vos dents où et quand vous le souhaitez, sous la supervision de votre dentiste. Vous obtiendrez en peu de temps de belles dents d'une blancheur naturelle, pour un sourire radieux.

POURQUOI LES DENTS CHANGENT-ELLES DE COULEUR ?

Au départ, nous avons pratiquement tous une dentition bien blanche. Avec le temps, le tabac, le café et d'autres aliments font que la teinte de nos dents va changer. Au fil des ans, des molécules colorées s'accumulent derrière l'émail. Et comme l'émail devient de plus en plus fin à mesure que nous vieillissons, les dents deviennent de plus en plus foncées. Mais il existe une solution! Vous pouvez blanchir vos dents de manière sûre, rapide et efficace avec le Cavex Bite&White ABC Masterkit.

BLANCHISSEMENT À DOMICILE : AUSSI SIMPLE QU'ABC!

Le Cavex Bite&White ABC Masterkit est un système en 3 étapes efficace, sûr et complet qui permet de blanchir les dents en à peine 30 à 60 minutes par jour.

A

ACTIVATION

Cavex Bite&White StainLess

Cavex Bite&White StainLess Ce dentifrice nettoie vos dents en profondeur. Les taches superficielles sont éliminées et le pH de la bouche est temporairement élevé, pour que le gel de blanchiment agisse plus rapidement. Vous commencez le traitement de blanchiment en vous brossant les dents pendant 2 minutes avec le dentifrice StainLess.

B

BLANCHIMENT

Cavex Bite&White gel

Gel Cavex Bite&White Le gel est conçu de telle manière qu'il se répand uniformément sur vos dents et que le peroxyde d'hydrogène commence immédiatement à blanchir les dents. Etant donné que vous vous êtes d'abord brossé les dents avec l'activateur StainLess, vous n'avez pas besoin de porter la gouttière pendant plus de 30 à 60 minutes.

Cavex Bite&White ABC Masterkit |

La solution complète de blanchiment en 3
étapes pour blanchir vos dents à domicile.



C

CONDITIONNEMENT

Cavex Bite&White ExSense

Cavex Bite&White ExSense Ce gel reminéralise les dents, ce qui les fait durcir et minimise le risque de sensibilité. Vous appliquez le gel dans la gouttière, que vous portez pendant 10 minutes.

PLUS D'INFORMATION

Pour en savoir plus sur le blanchiment, adressez-vous à votre dentiste. Celui-ci peut vous donner tous les renseignements utiles sur Cavex Bite&White et vous accompagner pendant votre traitement de blanchiment. Scannez le code QR pour regarder la vidéo sur l'ABC Masterkit.



Cavex Bite&White ABC Masterkit | Un système
complet de blanchiment en 3 étapes en un seul kit.

CAVEX BITE&WHITE: LA SOLUTION COMPLÈTE DE BLANCHIMENT EN 3 ÉTAPES POUR BLANCHIR VOS DENTS À DOMICILE

Cavex Bite&White est un produit de Cavex Holland. Cavex Holland propose depuis plus de 100 ans des produits aux dentistes du monde entier. Tous les produits Cavex font l'objet de tests rigoureux et sont conformes aux normes et législations du monde entier. Ils sont recommandés par les dentistes.