


# PROTOCOL VOOR DE PERFECTE AFDRUK

## 1. Doseren


- Vul de container regelmatig zodat bij deze niet te leeg is tijdens het doseren.

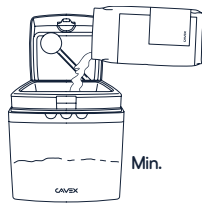

- Roer het alginaat goed door voor gebruik.




- Vul de maatlepel en strijk in één beweging weg langs de afstrijkkrand aan de binnenkant van de container.

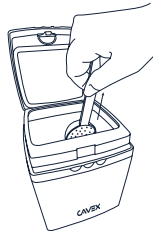

## 2. Voorbereiding patiënt

- Laat de patiënt spoelen met water om eventuele slijmvorming te verwijderen.
- Bij een bracket of anderszins utilitywax of uitblokwas gebruiken

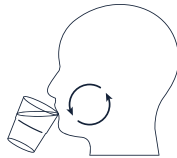

## 3. Keuze afdruklepel

- Kies voor een geperforeerde afdruklepel met een hoge stijfheid.
- Zorg dat de afdruklepel alle elementen omsluit met een extra marge van 5 mm.




## 4. Mengen

- Handmatig: minimaal 30 seconden krachtig spatelen tot een homogene mix.



- Mixer: kort roeren met het roerstaafje en mengen volgens het protocol van de mixer, voor een gegarandeerd resultaat zonder klontjes of luchtballen.

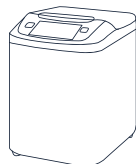


## 5. Afdruk

- Maak altijd een volledige afdruk.
- Vul de afdruklepel zoveel mogelijk in één beweging om luchtballen te voorkomen.
- Verdeel het alginaat allereerst gelijkmatig in de afdruklepel. Breng daarna wat extra alginaat aan de labiale zijde aan, en wat minder ter hoogte van de A-lijn.
- Voorstrijken van het alginaat is niet nodig; het spoelen van de mond voorkomt luchtballen.
- Gebruik ruim voldoende alginaat bij een hoog palatum en let op de juiste afdruktechniek.
- Let tijdens het afdrukken op de lip: houd deze goed weg zodat het alginaat eronder kan vloeien.
- Let er tijdens de bovenzijde afdruk op dat de lepel ter hoogte van de A-lijn niet naar beneden zakt. Dit verhoogt het risico op kokhalzen.




## 6. Na de afdruk

- Spoel de afdruk goed af onder de kraan met koud water.
- Controleer de afdruk: alle elementen compleet / omslagplooi / palatum / geen luchtballen op kritisch plaatsen / gecentreerd / niet doorgedrukt / bewogen / gescheurd / etc.


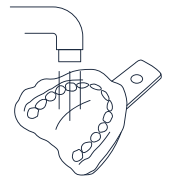


- Desinfecteer de afdruk gedurende 3 minuten in Cavex ImpreSafe. Gebruik géén alcohol.
- Spoel de afdruk opnieuw af onder de kraan en klop overmatig water af.

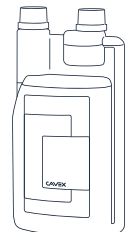

Cavex ImpreSafe

- Plaats de afdruk in een plastic grip zak en sluit deze zorgvuldig af.
- Voeg géén wattenrollen, tissues, extra water etc. toe. Dit verstoort de vochtbalans!
- Bewaar de afdruk nooit in de koelkast.

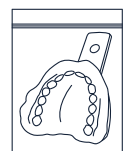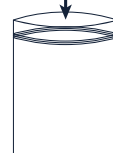

**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**