

DAS GEHEIMNIS DETAILLIERTER ABFORMUNGEN

Entdecken Sie die "Sandwich-Technik" mit Cavex Alginaten

Beim Abdruck eines bezahnten Kiefers ist Präzision von größter Bedeutung. Bei der „Sandwich-Schichttechnik“ wird flüssiges Alginat und steiferes Alginat verwendet, um einen Abdruck zu erstellen, der die Zahn- und Zahnfleischstrukturen bis ins kleinste Detail erfasst. Diese Technik bietet eine mit Silikonabdrücken vergleichbare Genauigkeit, bietet jedoch die Vorteile von Alginat. Das Ergebnis ist ein äußerst detaillierter Abdruck, der zur perfekten Passform von Kronen, Brücken oder anderen Restaurationen beiträgt.

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

Schritt 1: Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber ist. Mit Wasser abspülen und überschüssige Feuchtigkeit abtrocknen, die Zähne jedoch feucht lassen.



Schritt 2: Alginat anmischen

- Mischen Sie das Cavex CA37 Alginat normal abbindend wie auf der Verpackung beschrieben und befüllen Sie den Abformlöffel.
- Mischen Sie zeitgleich das Cavex Cream Alginat normal abbindend, wie auf der Verpackung beschrieben und befüllen Sie die Spritze.

Schritt 3: Umspritzen des Sulcus mit Alginat

Nehmen Sie die Spritze und applizieren das Alginat in den Sulcus.



Schritt 4: Einbringen des Abformlöffels

Platzieren Sie den Abformlöffel im Mund des Patienten und lassen die Abformung mit der vorgeschriebenen Zeit ohne Bewegung aushärten.



Schritt 5: Abformung entnehmen

Nachdem das Alginat vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie die Abformung vorsichtig aus dem Mund. Überprüfen Sie, ob alle gewünschten Details deutlich sichtbar sind.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**