


CAVEX ALGINATE MIXER 3 PROTOCOL



1 Doe de juiste dosering algiinaat en water in de mengbeker.



2 Roer kort voor om de mengbeker makkelijker te kunnen reinigen en ter behoud van de mixer.

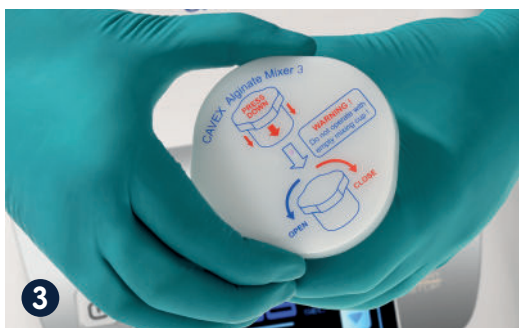

3 Sluit de mengbeker goed door het deksel, met de klok mee, dicht te draaien.



4 Plaats de mengbeker in de mixer en sluit het deksel.



5 Kies het programma, druk op start en wacht tot het programma is afgerond.



6 Haal de algiinaat mix in één beweging uit de mengbeker en breng het aan in de afdrucklepel.

Aanbevolen dosering bovenkaak



Aanbevolen dosering onderkaak



Accessoires



Onderhoud en reiniging van de Cavex Alginate Mixer 3:

Voorkom vervuiling van de mixer door deze regelmatig te reinigen. Wanneer vervuiling los komt, kan deze in de motor terecht komen en de motor beschadigen.

1. Los wat Cavex GreenClean op in een bakje water.
2. Bevochtig een doekje (niet te nat!) met de GreenClean oplossing en reinig de mixer.
3. Gebruik het roerstaafje met het vochtige doekje om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**