

# CAVEX ALGINATE MIXER II PROTOKOLL



**1** Zunächst Alginatpulver, dann Wasser dosieren und in den Mischbecher geben.



**2** Immer vorrühren! Dies vermeidet Verunreinigungen und dient so der Haltbarkeit des Gerätes.



**3** Deckel des Mischbechers schließen und in den Cavex Alginate Mixer stellen.



**4** Cavex Alginate Mixer schließen und auf Start drücken.



**5** Das Alginat in einer Bewegung aus dem Behälter nehmen und in den Löffel füllen.

Empfohlene Dosierung  
Oberkiefer



Empfohlene Dosierung  
Unterkiefer



Zubehör



## Wartung und Reinigung des Cavex Alginate Mixer II:

Verhindern Sie die Verschmutzung des Mixers, indem Sie diesen regelmäßig reinigen. Wenn sich die Verschmutzung löst, kann diese in den Motor gelangen und diesen beschädigen.

1. Lösen Sie etwas Cavex GreenClean in einer Schale Wasser
2. Befeuchten Sie ein Tuch (nicht zu nass!) mit der GreenClean-Lösung und reinigen Sie den Mixer.
3. Verwenden Sie den Rührstab mit dem feuchten Tuch, um schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.

**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**