

# CAVEX ALGINATE MIXER II PROTOCOL



1 Dosificar la cantidad de polvo de alginato y agua y agregarlos en el vaso de mezclar.



2 ¡Agítelo siempre previamente! Esto facilita la limpieza y prolonga la vida útil del aparato.



3 Ponga la tapa y coloque el vaso en el Cavex Alginat Mixer.



4 Cierre el Cavex Alginat Mixer y pulse 'start'.



5 Extraiga el tazón y aplique el alginato en la cubeta.

dosificación  
recomendada para la  
mandíbula superior



dosificación  
recomendada para la  
mandíbula inferior



Accesorios



## Mantenimiento/limpieza del Cavex Alginat Mixer II:

Evite la contaminación de la mezcladora de alginatos limpiándola con regularidad. Cuando la contaminación se suelta, puede entrar en el motor y dañarlo.

1. Disuelva un poco de Cavex GreenClean para la eliminación del alginato en un recipiente con agua.
2. El aparato es fácil de limpiar con una toallita humedecida (ino mojada!) con solución de Cavex GreenClean y la espátula de mezclar.
3. Mantenga el Cavex Alginat Mixer siempre limpio, para evitar que se formen depósitos en el aparato.

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY