

CAVEX ALGINATE MIXER II PROTOCOLE



1 Dosez la quantité de poudre d'alginate et d'eau et transférez-les dans le godet de mélange.



2 Toujours mélanger au préalable! Ceci facilite le nettoyage du couvercle du godet de mélange et garantit aussi la longévité de l'appareil.



3 Mettez le couvercle par dessus et placez le tout dans le Cavex Alginate Mixer.



4 Fermez et appuyez sur start.



5 Prenez avec la spatule en un mouvement l'alginate et placez-le dans le porteempreinte.

Entretien et nettoyage de Cavex Alginate Mixer II:

Évitez l'encrassement du mixeur en le nettoyant régulièrement. Lorsque la saleté se détache, elle peut se retrouver dans le moteur et l'endommager.

1. Dissolvez un peu de Cavex GreenClean dans un récipient d'eau.
2. Humidifiez légèrement un linge avec la solution GreenClean et nettoyez le mixeur.
3. Utilisez le bâtonnet mélangeur avec le linge humidifié pour nettoyer les endroits difficilement accessibles.

Dosage recommandé
mâchoire supérieure



Dosage recommandé
mâchoire inférieure



Accessoires



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY