

CAVEX ALGINATE MIXER II PROTOCOLLO



1 Dosare la quantità di polvere di alginato e d'acqua e versare il tutto nella ciotola.



2 Mescolare sempre i componenti! Facilita la pulizia e garantisce una superiore longevità dell'apparecchio.



3 Chiudere con il coperchio e mettere il contenitore nel Cavex Alginat Mixer.



4 Chiudere il Cavex Alginat Mixer e premere il pulsante d'avvio (start).



5 Un segnale acustico indica la fine del ciclo. Aprire il coperchio e con un unico movimento della spatola togliere l'alginato e posizionarlo nel porta impronta.

Dose consigliata per l'arcata superiore



Dose consigliata per l'arcata inferiore



Accessories



Manutenzione/pulizia di Cavex Alginat Mixer II:

Prevenire la contaminazione del miscelatore per alginati pulendolo regolarmente. Quando la contaminazione si stacca, può entrare nel motore e danneggiarlo.

1. Sciogliere in un contenitore d'acqua un po' di Cavex GreenClean per rimuovere l'alginato dagli strumenti utilizzati.
2. Per pulire facilmente l'apparecchio occorrono solo un panno inumidito (non bagnato) di soluzione Cavex GreenClean e il bastoncino di miscelazione.
3. Evitare che nel Cavex Alginat Mixer si accumuli lo sporco. Nell'apparecchio si formeranno meno depositi.

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**