

# CAVEX ALGINATE MIXER II PROTOCOL



1 Hoeveelheid alginatpoeder en water doseren en in het mengbakje doen.



2 Altijd voorroeren! Dit vereenvoudigt het reinigen en is ook voor het behoud van het apparaat.



3 Deksel erop en in de Cavex Alginat Mixer plaatsen.



4 Cavex Alginat Mixer sluiten en op start drukken.



5 Neem in één beweging het alginat uit het bakje en breng deze aan in de lepel.

Aanbevolen dosering  
bovenkaak



Aanbevolen dosering  
onderkaak



Accessoires



## Onderhoud en reiniging van de Cavex Alginat Mixer II:

Voorkom vervuiling van de mixer door deze regelmatig te reinigen. Wanneer vervuiling los komt, kan deze in de motor terecht komen en de motor beschadigen.

1. Los wat Cavex GreenClean op in een bakje water.
2. Bevochtig een doekje (niet te nat!) met de GreenClean oplossing en reinig de mixer.
3. Gebruik het roerstaafje met het vochtige doekje om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY