

Protokol Cavex Alginate Mixer II



Návod na použitie:

1. Odmerajte určené množstvo alginátového prášku a vody a dajte ho do nádoby na miešanie.

Odporúčané dávkovanie pre hornú čeľusť



Odporúčané dávkovanie pre dolnú čeľusť



2. Vždy vopred premiešajte! Toto uľahčí čistenie a prospieva životnosti prístroja.

3. Upevnite vrchnák a umiestnite nádobku do Cavex Alginate Mixer.

4. Uzavrite Cavex Alginate Mixer a stisnite Start

5. Jedným pohybom vyberte alginát z nádoby a umiestnite ho na lyžicu

Údržba/čistenie Cavex Alginate Mixer:

1. Rozpusťte trochu odstraňovača alginátu Cavex GreenClean v miske s vodou..
2. Prístroj je možné jednoducho čistiť papierovou utierkou, ktorá je navlhčená (nie namočená!) v Cavex GreenClean roztoku, a tyčinkou na miešanie.
3. Predídte tomu, aby sa miešačka Cavex Alginate Mixer znečistila. Tak sa môže dostať menej zvyškového materiálu do prístroja.

