

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT FINISENSE

-
En cuellos de dientes sensibles.
Prevención y alivio de la
sensibilidad postoperatoria.

- surte efecto a los 30 segundos
- efectivo durante 12 meses o más
- no deja película sobre la superficie
- es fácil de usar
- hasta 150 aplicaciones por envase




CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT FINISENSE


MODO DE OPERACIÓN

Finisense puede utilizarse para dentina expuesta y la preparación de coronas e incrustaciones. El sellado intradentinario inmediato detiene el movimiento del fluido en los túbulos, previniendo y aliviando eficazmente el dolor postoperatorio.

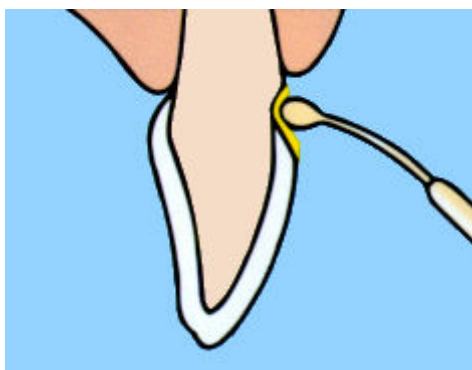

Dentina expuesta

- Limpie la dentina (con piedra pómez, por ejemplo)
- Seque la superficie de la dentina cuidadosamente
- Aplique Quadrant FiniSense y deje que actúe durante 30 segundos
- Seque con un suave chorro de aire
- Enjuague a conciencia con agua

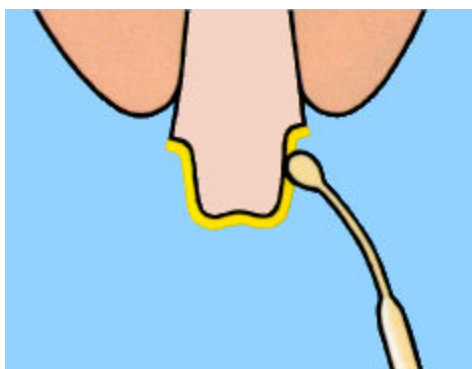

Preparación de coronas e incrustaciones

- Seque la superficie de la dentina cuidadosamente
- Aplique Quadrant FiniSense y deje que actúe durante 30 segundos
- Seque con un suave chorro de aire
- Enjuague a conciencia con agua