

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT FINISENSE

-
Lors de douleurs causées par une dentine exposée. Prévention et atténuation des douleurs postopératoires après préparation de couronnes et d'inlays.

- efficace en 30 secondes
- actif pendant 12 mois ou plus
- ne laisse pas de film sur la surface après application
- facile d'emploi
- 150 applications par flacon




CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT FINISENSE


COMMENT L'UTILISER ?

Finisense peut être utilisé pour la dentine exposée ainsi que pour la préparation des couronnes et des incrustations. Le scellement intradentinaire immédiat arrête le mouvement des fluides dans les tubuli, prévenant et soulageant efficacement la douleur postopératoire.

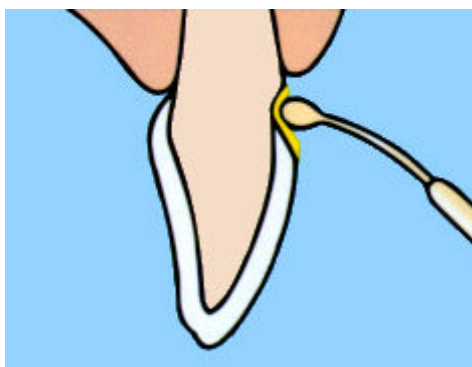

La dentine exposée

- Nettoyage de la dentine avec par exemple de la pierre ponce
- Sécher prudemment la surface dentinaire
- Appliquer le Quadrant FiniSense et laisser agir 30 secondes
- Sécher tout doucement à l'air
- Rincer abondamment à l'eau

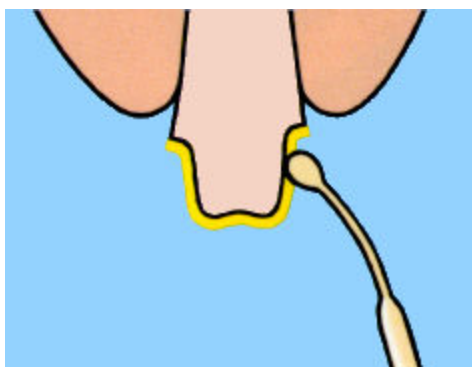

Préparation de couronnes et d'inlays

- Sécher prudemment la surface dentinaire
- Appliquer le Quadrant FiniSense et laisser agir 30 secondes
- Sécher tout doucement à l'air
- Rincer abondamment avec de l'eau