

PREMIUM RESTORATIVES

# QUADRANT FINISENSE

-

In caso di sensibilità al colletto.  
Prevenzione e terapia  
del dolore post-operatorio.

- agisce in 30 sec.
- efficace per 12 mesi ed oltre
- non lascia pellicola sulla superficie
- facile da usare
- 150 applicazioni per flacone




CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

# QUADRANT FINISENSE


## COME AGISCE?

Finisense può essere utilizzato per la dentina esposta e per la preparazione di corone e intarsi. La sigillatura intradentinale immediata blocca il movimento dei fluidi nei tubuli, prevenendo e alleviando efficacemente il dolore post-operatorio.

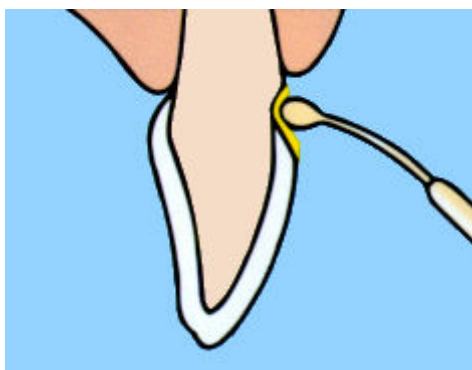

Dentina esposta

- Pulire la zona (es. con della pomice)
- Asciugare con cura la superficie
- Applicare Quadrant Finisense e lasciarlo agire per 30 sec.
- Asciugare delicatamente
- Risciacquare accuratamente

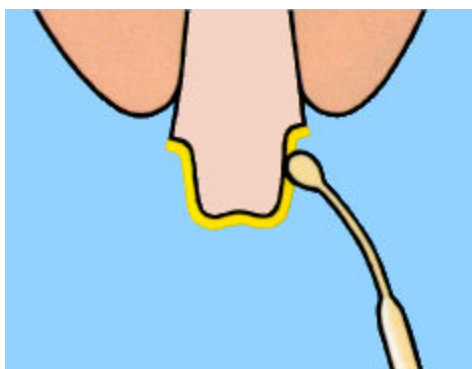

Preparazione di corone e intarsi

- Asciugare con cura la superficie
- Applicare Quadrant Finisense e lasciarlo agire per 30 sec.
- Asciugare delicatamente
- Risciacquare accuratamente