

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT FINISENSE

-
Bij pijn door blootliggend dentine.
Preventie en verlichting van
post-operatieve pijn na preparatie
van kronen en inlays.

- werkt binnen 30 seconden
- werkt 12 maanden of langer
- laat geen film op het oppervlak na
- eenvoudig in gebruik
- 150 applicaties per flesje




CAVEX

QUADRANT FINISENSE


HOE WERKT HET?

Finisense kan worden gebruikt voor blootliggende dentine en kroon- en inlay-preparatie. Onmiddellijke intradentinale verzegeling stopt de vloeistofbeweging in de tubuli, wat effectief postoperatieve pijn voorkomt en verlicht.

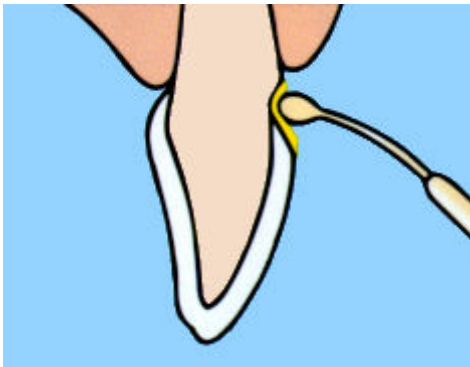

Blootliggend dentine

- Reinigen van dentine met bijvoorbeeld puimsteen
- Voorzichtig drogen van het dentine-oppervlak
- Quadrant FiniSense aanbrengen en 30 sec. laten inwerken
- Zacht droog blazen
- Grondig spoelen met water

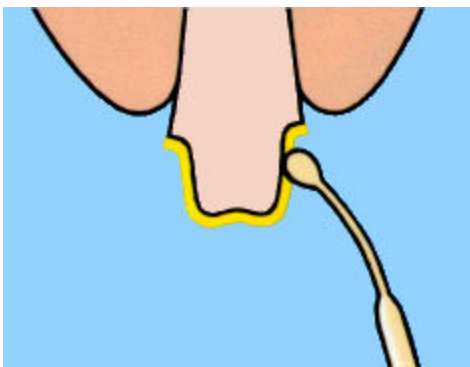

Kroon- & inlay-preparatie

- Voorzichtig drogen van het dentine-oppervlak
- Quadrant FiniSense aanbrengen en 30 sec laten inwerken
- Zacht droog blazen
- Grondig spoelen met water