

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

-
ACTIVATE - BLEACH - CONDITION

Sichere, wirksame und schmerzfreie
Bleaching-Behandlungen unter
Ihrer eigenen Aufsicht.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

Wünscht sich Ihr*e Patient*in ein langfristiges und gründliches Bleaching-Ergebnis bei minimaler Empfindlichkeit der Zähne? Dann wählen Sie das ABC Masterkit: die effektivste und umfassendste Bleaching-Behandlung.

Wie funktioniert das?

A

AKTIVIEREN mit Cavex Bite&White StainLess (2-3 Minuten).

Die Zähne sollten mit der Paste geputzt werden, um die Zahnoberfläche gründlich zu reinigen, damit das Aufhellungsgel mit dem Zahnschmelz in direkten Kontakt kommt. Darüber hinaus erhöht StainLess den pH-Wert im Mund, wodurch die Bleaching-Behandlung noch effektiver wird.

B

BLEICHEN mit Cavex Bite&White Gel (30-60 Minuten).

Das in einer Einlage um die Zähne getragene Aufhellungsgel enthält 16 % Carbamidperoxid, was 6 % Wasserstoffperoxid entspricht. Das zugesetzte Natriumfluorid stärkt den Zahnschmelz, und das Kaliumnitrat minimiert jegliche Empfindlichkeit.



C

CONDITION (PFLEGEN) mit Cavex Bite&White ExSense (5-10 Minuten).

Das Gel kann in derselben Einlage getragen werden und enthält eine einzigartige Zusammensetzung aus Hydroxylapatit und einem hydrodispersen Sol. Dies versiegelt die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz und minimiert die Schmerzempfindlichkeit der Zähne. Darüber hinaus trägt ExSense zur Remineralisierung bei und stellt die Mikrohärtigkeit der Zahnelemente wieder her.

Weitere Informationen:
Scannen Sie den QR-Code,
um im Video weitere
Informationen zu erhalten.



ACTIVATE - BLEACH - CONDITION

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

ZYBWO9001D-01

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Niederlande | cavex.nl