

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

-
ACTIVER - BLANCHIR - TRAITER

Solution de blanchiment sûre,
efficace et sans douleur,
sous votre régie.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

Votre patient recherche un résultat de blanchiment profond et durable avec une sensibilité minimale ? Optez alors pour l'ABC Masterkit : le traitement de blanchiment le plus efficace et complet.

Comment ça fonctionne ?

A

ACTIVER avec Cavex Bite&White StainLess (2-3 minutes).

Il faut brosser les dents avec la pâte pour nettoyer la surface afin que le gel de blanchiment puisse entrer directement en contact avec l'émail dentaire. D'autre part, StainLess augmente le pH dans la bouche de manière à intensifier encore l'efficacité du traitement de blanchiment.

B

BLANCHIR avec Cavex Bite&White gel (5-10 minutes).

Appliqué avec les gouttières, le gel de blanchiment contient 16 % de peroxyde de carbamide, ce qui équivaut à 6 % de peroxyde d'hydrogène. Le fluorure de sodium ajouté renforce l'émail et le nitrate de potassium minimise une éventuelle sensibilité.



C

TRAITER avec Cavex Bite&White ExSense (5-10 minutes).

Le gel peut être porté dans les mêmes gouttières de blanchiment et contient une composition unique d'hydroxyapatite et un sol hydrodispersant. Cela permet de sceller les tubuli et microfissures de l'émail, minimisant ainsi la sensibilité. En outre, ExSense contribue à la reminéralisation et restaure la micro-dureté des éléments.

Plus d'informations

Scannez le code QR pour voir la vidéo avec plus d'informations.



A C T I V E R - B L A N C H I R - T R A I T E R

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl