

# Cavex Boil&Bite

ONE BITE FITS ALL

## Revolutionär

Diese *thermoplastische Schiene* ist eine **integrierte obere und untere Schiene** und für verschiedene Zwecke einsetzbar. Sie ist besonders schleimhautverträglich!

## Sehr einfach

Zahnarzt oder Patient können Cavex Boil&Bite selber formen.

1. Wasser zum Kochen bringen.
2. Cavex Boil&Bite in ein geeignetes hitzebeständiges Gefäß geben.
3. Ausreichend Wasser hinzugeben, so dass sich die Schiene - mit Ausnahme des Griffes - unter Wasser befindet. Schiene 1 Minute im Wasser liegen lassen.
4. Cavex Boil&Bite vorsichtig aus dem Wasser herausnehmen.
5. Überschüssiges Wasser abschütteln.
6. Cavex Boil&Bite sofort in den Mund bringen und Schiene ausrichten. Dabei mit den Fingern gut gegen die oberen und unteren Zähne drücken.



## Vielseitig einsetzbar

Diese individuell angefertigte Schiene ist sehr gut für mehrere Zwecke einsetzbar:

- **Bleichbehandlungen**
- **Fluorbehandlungen**
- **Bei Zahnempfindlichkeit**

Durch den Abdruck des Gebisses in der Schiene bleiben aufgetragene Gele gut haften.

So kann z.B. mit Cavex Bite&White gebleicht werden. Nach Reinigung können die Zähne z.B. mit Cavex Bite&White ExSense einfach und effektiv mit der selben Schiene **konditioniert und desensibilisiert** werden.

## 8 Bits in 1 Packung



■ **Cavex Holland BV**  
Fustweg 5  
2031 CJ Haarlem  
Niederlande

T +31 23 530 77 00  
dental@cavex.nl  
www.cavex.nl